


Gebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung

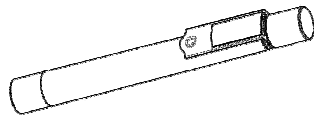


Funktionen des Leuchtstiftes

1. aus 2. an - Tastlicht 3. an - Dauerlicht 4. Batteriewechsel

Batteriewechsel

- Öffnen des Leuchtstiftes
 - Schalteinheit ganz nach links drehen
 - Schalteinheit aus dem Gehäuse herausnehmen

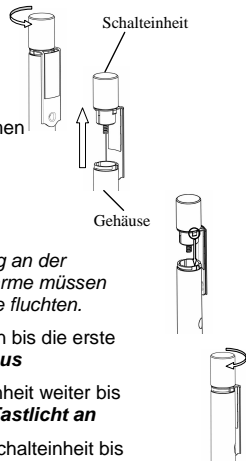

- Batterien austauschen
- Schalteinheit in das Gehäuse einstecken.

Achtung: Leuchtmittel sitzt lose


Achtung: Clip muß zu der runden Aussparung an der Gehäusemantelfläche zeigen. Cliparme müssen mit den Aussparungen am Gehäuse fluchten.

- Schalteinheit am Schaltkopf nach rechts drehen bis die erste Schaltstufe erreicht ist. ⇒ **aus**
- Um den Leuchtstift einzuschalten, die Schalteinheit weiter bis zur nächsten Schaltstellung drehen ⇒ **Tastlicht an**
- Das Dauerlicht wird eingeschaltet, indem die Schalteinheit bis zum Anschlag nach rechts gedreht wird ⇒ **Dauerlicht an**

CE 2 x Micro AAA / LR03 / 1,5 V
Aufgebrauchte Batterien bei einer Entsorgungsstelle abgeben

Mellert SLT GmbH & Co. KG
Langenmorgen 2 Tel. +49(0)7252 / 505-0
D-75015 Bretten Fax +49(0)7252 / 505-10

directions for use directions for use

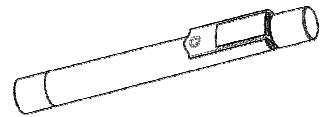


Features of Penlight

1. off 2. on - tip light 3. on - steady light 4. battery change

Battery change

- open the Penlight
 - turn the switch unit total left
 - take the switch unit of the body out

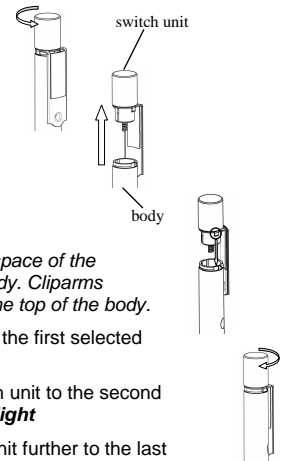

- change batteries
- put the switch unit into the body.

Attention: don't drop illuminant

Attention: turn the Clip to the circular space of the generated surface of the body. Cliparms must align with spaces on the top of the body.

- turn the switch unit right until you reach the first selected point. ⇒ **off**
- to switch the penlight on, turn the switch unit to the second selected point ⇒ **on tip light**
- to get the steady light, turn the switch unit further to the last selected point. ⇒ **on steady light**

CE 2 x Micro AAA / LR03 / 1,5 V
Hand used batteries at an appropriate collection site

Mellert SLT GmbH & Co. KG
Langenmorgen 2 Tel. +49(0)7252 / 505-0
D-75015 Bretten Fax +49(0)7252 / 505-10